

Назальный аспиратор — важнейший компонент аптечки малыша!
Заложенность носа и излишки слизи могут привести к отказу ребенка от еды, нарушениям сна и повышенному беспокойству.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

0-3
ЛЕТ

Аспиратор назальный аквалор® беби 1+3

с адаптированной мягкой носовой насадкой, уникальной системой захвата слизи* и удобными фиксаторами для рта устраняет заложенность носа ребенка, восстанавливая свободное дыхание.

комфортно для малыша

Гибкая мягкая носовая насадка разработана в соответствии с анатомическими особенностями полости носа у детей младшего возраста.

Форма носовой насадки, ее гибкость и устойчивость к деформации обеспечивают комфортное для ребенка применение и предотвращают повреждение слизистой оболочки полости носа в процессе использования.

Инновационная концепция аспиратора с гигиеничным захватом слизи* — во время аспирации слизь задерживается в резервуаре, который можно легко разобрать и очистить.

удобно для мамы

Эргономичный корпус

Фиксаторы для рта на ротовой насадке

Надежный пластиковый футляр и 3 запасных системы фильтрации в комплекте



* По состоянию на 26.04.2017г. аспиратор Аквалор беби — единственный с аналогичной конструкцией в РФ

Как правильно пользоваться аспиратором Аквалор® беби

1 Промыть полость носа ребенка раствором на основе морской воды, например, каплями или бережным спреем Аквалор беби.



2 Поместить ротовую насадку аспиратора Аквалор беби себе в рот, а носовую — в правую половину носа ребенка и сделать осторожный вдох, удаляя слизь. Повторить процедуру на левой половине носа ребенка.



3 Свободное дыхание малыша восстановлено, он может играть, есть, спать!
После завершения процедуры разобрать аспиратор, промыть теплой водой с мылом.

